



Dozowanie płynów:

Standardowo dozownik jest ustawiony na dawkowanie maksymalnej ilości płynu wynoszącej 1,5 ml na jeden ruch dozownika. Poprzez zmianę położenia widełek w lewo ogranicza się ilość dozowania do 1,0 ml, natomiast przesunięcie widełek w prawo ogranicza dozowanie do 0,8 ml.

Sterylizacja pompki lub całego dozownika:

Wykonać punkt 1 i 2 montażu dozownika. Potem sterylizować pompkę lub cały dozownik gorącą parą wodną (121°C przy ciśnieniu 1 bar).

Czyszczenie dozownika i pompki:

Dozownik w zasadzie nie wymaga czyszczenia. Jednakże z uwagi na zalecenia przeciw infekcjom i ze względu na higienę dozownik powinien być regularnie czyszczony lub ewentualnie także dezynfekowany:

- Do wyczyszczenia pompki najpierw należy usunąć pojemnik na płyn, potem nacisnąć blokadę i cały dozownik wyjąć z płyty ściennej.
- Trzymać za rączkę w pozycji górnej i pompkę wyciągnąć z tyłu. Aby pompkę zamontować ponownie wykonać czynności odwrotnie, przy tym trzymając rączkę również w górnej pozycji.
- Pompkę czyścić tylko przy użyciu łagodnych środków czyszczących.
- Jeśli dojdzie do zapchania pompki (na przykład poprzez długi czas nieużywania) wyjąć pojemnik i przepłukać pompkę w gorącej wodzie aż do odetkania.